



## BODE X-Wipes

Universell einsetzbares Vliestuchspendersystem für flüssige HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel.



### Anwendungsgebiete

Applikationshilfe für die professionelle Reinigung und Desinfektion. Die BODE X-Wipes eignen sich für alle flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel.

### Anwendung

Das BODE X-Wipes Spendersystem ist für den Einsatz mit flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmitteln in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von einer Stunde oder kürzer (gem. VAH) geeignet.

### Produkteigenschaften

- Schützt Anwendungslösungen vor Kontamination und Verdunsten
- Reißfestes Vlies
- Farbiges Entnahmesystem zur besseren Produktunterscheidung

Der BODE X-Wipes Spender wird mit 2 Liter Anwendungslösung oder 1,2 Liter bei der 40er Rolle des verwendeten HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittels befüllt. Beim Einsatz der 40er Rolle in der BODE X-Wipes Dose wird diese mit 800ml Anwendungslösung befüllt. Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise des jeweiligen Produktes und Einsatzkonzentrationen zu beachten.

### X-Wipes Vliestücher

Je nach Bedarf sind Vliesrollen mit einem Umfang von 90 oder 40 Einzeltüchern erhältlich. Saugfähiges Polyestervlies (60 g/m<sup>2</sup>). Auch als BODE X-Wipes basic Vliesrolle verfügbar, die mit 40 g/m<sup>2</sup> eine leichtere Vliesqualität bietet (90 Einzeltücher).

### Dosierung

Entsprechend der eingesetzten Vliesrolle wird der BODE X-Wipes Spender mit 2 Liter Anwendungslösung (90er Rolle) oder 1,2 Liter (40er Rolle) befüllt. Beim Einsatz der 40er Rolle in der BODE X-Wipes Dose wird diese mit 800ml Anwendungslösung befüllt.



### Kompatibilität

Das BODE X-Wipes Spendersystem kann mit folgenden HARTMANN-Desinfektionsmitteln benutzt werden:

- Mikrobac® forte
- Kohrsolin® FF
- Bacillo® AF
- Bacillo® 30 Sensitive Foam

### Standzeit

Bei ordnungsgemäßem Verschluss verfügen die in BODE X-Wipes eingesetzten Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN über eine Standzeit von 28 Tagen.

# BODE X-Wipes

## Zwei Möglichkeiten der Befüllung

### Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle mit Folienbeutel in sauberen, trockenen Spender einsetzen.



Desinfektionslösung in den Folienbeutel geben, Vliestuchrolle gleichmäßig benetzen.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Schrauben Sie den Deckel am Spender wieder zu. Etikett beschriften.



Folie zusammen mit Deckel entsorgen.

### Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der Standard BODE X-Wipes Vliesrolle



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle einsetzen.



Lösung von innen nach außen zugeben.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen und Spender sorgfältig verschließen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Etikett beschriften.



Spender vor der Wiederbefüllung manuell oder maschinell desinfizieren.

#### Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



Wir forschen für  
den Infektionsschutz  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
<b>BODE X-Wipes Spender für Vliesrolle im Folienbeutel, für 40er und 90er Vliesrolle</b>				
	1 Spender Deckelverschluss blau	981 370	10273940	4
	1 Spender Deckelverschluss grün	981 372	10273963	4
	1 Spender Deckelverschluss rot	981 371	10273957	4
<b>BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher im Folienbeutel inkl. Deckelsystem</b>				
	90 Tücher Größe 200 x 300 mm	981 946	19175914	8
<b>BODE X-Wipes Vliesrolle</b>				
	90 Tücher Größe 200 x 300 mm	980 556	3538510	6
	40 Tücher Größe 200 x 300 mm	980 557	3538473	12
<b>BODE X-Wipes basic</b>				
	90 Tücher Größe 200 x 300 mm	980 524	3538527	6
<b>BODE X-Wipes Dose für 40er Vliesrolle</b>				
	1 Stück	980 610	3539337	6
<b>BODE X-Wipes Wandhalter</b>				
	1 Stück	980 583	3539219	1
<b>BODE X-Wipes Sicherungsbügel</b>				
	1 Stück	980 584	3539225	1

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)