
### **Technisches Datenblatt**

# MaiMed® MyClean DS ViruComplete

Desinfektionstücher mit Alkohol

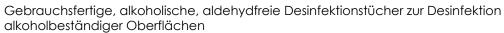

Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

- O Tränklösung wirkt bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid und viruzid (gemäß EN 14476)
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Aldehydfrei
  - 150 Tücher (15 cm x 18 cm)



MaiMed® MyClean DS ViruComplete sind gebrauchsfertige, alkoholische, aldehydfreie Desinfektionstücher zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen, im Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie.

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.

Nur feuchte Tücher verwenden. Nur für den professionellen Gebrauch.









Ausführung:

#### MaiMed® MyClean DS ViruComplete

| Artikelbeschreibung | Tuchgröße  | Pack-Inhalt | ArtNr./REF | EAN           | PZN      | Pack/VE |
|---------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------|---------|
| Desinfektionstücher | 15 x 18 cm | 150 Blatt   | 279623     | 4046153116331 | 19359962 | 12 Pack |

### Einwirkzeiten:

|  | Belastung                        | Normen           | Einwirkzeiten |
|--|----------------------------------|------------------|---------------|
| Bakterizid (mit Mechanik)  | hohe Belastung                   | EN 13727*, 16615 | 1 Minute      |
| Levurozid (mit Mechanik)   | hohe Belastung                   | EN 13624*, 16615 | 1 Minute      |
| Fungizid (Candida albicans,<br>Aspergillus brasiliensis)                         | hohe Belastung                   | EN 13624*        | 5 Minuten     |
| Tuberkulozid/mykobakterizid<br>(M. terrae, M. avium)                             | hohe Belastung                   | EN 14348*        | 1 Minute      |
| Begrenzt viruzid (Vaccinia<br>Stamm Elstree, BVDV<br>Stamm NADL)                 | 10% FKS (fötales<br>Kälberserum) | DVV/RKI*         | 1 Minute      |
| Begrenzt viruzid (Modified<br>Vaccinia Ankara)                                   | niedrige Belastung               | EN 14476         | 1 Minute      |
| Begrenzt viruzid PLUS<br>(- Adenovirus Typ 5)<br>(- Murines Norovirus)           | 10% FKS (fötales<br>Kälberserum) | DVV/RKI*         | 1 Minute      |
| Viruzid (wirksam gegen<br>Polyomavirus SV40)                                     | 10 %FKS (fötales<br>Kälberserum) | DVV/RKI*         | 5 Minuten     |
| Viruzid<br>(- Adenovirus Typ 5)<br>(- Murines Norovirus)<br>(- Poliovirus Typ I) | niedrige Belastung               | EN 14476*        | 5 Minuten     |

<sup>\*</sup>an der Tränklösung getestet

**Zusammensetzung:** In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten:

63,50 g Ethanol; 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid





**MaiMed® GmbH |** Robert-Koch-Str. 1–7 | 29643 Neuenkirchen Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de

## **Technisches Datenblatt**

## MaiMed® MyClean DS ViruComplete



Desinfektionstücher mit Alkohol

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenrei-

zung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger

Haut führen.

Qualitätssicherung: Biozidverordnung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Beim Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise gemäß

UFI: 6STO-00VP-M00C-9MW9

Gefahrenstoffverordnung im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Biozid Reg. Nr.: N-103524 eClass: 30-30-01-03

Verwendbarkeit: 2 Jahre

Haltbarkeit nach Innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole:

Anbruch:





