

DOSIERTABELLE

FÜR DIE HERSTELLUNG VON GEBRAUCHSFERTIGEN DESINFEKTIONSLSÜSUNGEN

| Anwendungs- konzentration* | 0,25 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,0 % | 4,0 % | 5,0 % |
|-------------------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Menge Gebrauchslösung | Menge Konzentrat | | | | | | | | |
| 1 Liter | 2,5 ml | 5 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 40 ml | 50 ml |
| 2 Liter | 5 ml | 10 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml | 50 ml | 60 ml | 80 ml | 100 ml |
| 3 Liter | 7,5 ml | 15 ml | 30 ml | 45 ml | 60 ml | 75 ml | 90 ml | 120 ml | 150 ml |
| 4 Liter | 10 ml | 20 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml | 100 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml |
| 5 Liter | 12,5 ml | 25 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml |
| 6 Liter | 15 ml | 30 ml | 60 ml | 90 ml | 120 ml | 150 ml | 180 ml | 240 ml | 300 ml |
| 7 Liter | 17,5 ml | 35 ml | 70 ml | 105 ml | 140 ml | 175 ml | 210 ml | 280 ml | 350 ml |
| 8 Liter | 20 ml | 40 ml | 80 ml | 120 ml | 160 ml | 200 ml | 240 ml | 320 ml | 400 ml |
| 9 Liter | 22,5 ml | 45 ml | 90 ml | 135 ml | 180 ml | 225 ml | 270 ml | 360 ml | 450 ml |
| 10 Liter | 25 ml | 50 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 250 ml | 300 ml | 400 ml | 500 ml |

*Konzentrat nach Tabelle mit kaltem Wasser zur angegebenen Gebrauchslösung auflösen.

Notwendige Konzentration und Einwirkzeit des jeweiligen Produktes bitte dem Etikett oder der Produktinformation entnehmen!